



1) Finger / Mittel oder Ringfinger kurz massieren



2) Stelle mit Alkoholtupfer reinigen



3) Lanzette öffnen und punktieren /einstechen




4) Ersten Blutstropfen mit Alkoholtupfer abtupfen



5) Mit Pipette Blut bis über Füllstrecke entziehen




6) Testkassette 1-2 Tropfen Blut einträufeln (20uL)

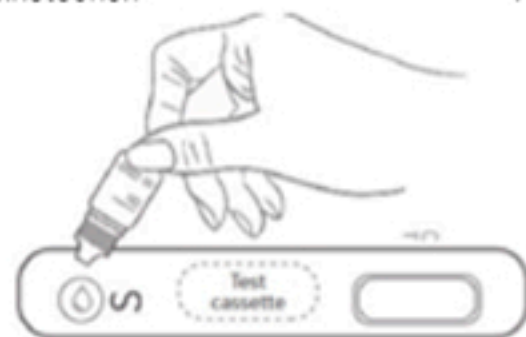

7) 2-3 Tropfen Lösung auf das Blut in der Kassette tropfen lassen

5 Minuten warten

Bereits nach 5 Minuten können Sie das Ergebnis ablesen

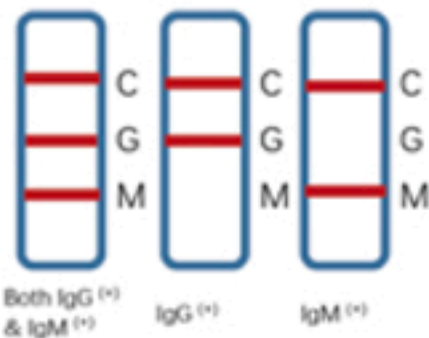

Ergebnis

Positiv



Ungültig

